

PhotoPHONE 100

Foto ID Forsterker Telefon



Norsk

INNHold

INNHold

INTRODUKSJON	3
Pakke ut Telefonen	4
BESKRIVELSE	5
Generell Beskrivelse.....	5
INSTALLASJON	7
Sette Opp	7
Vegg Montering	7
INNSTILLINGER	8
Ring Innstilling	8
Flash Innstilling.....	8
Mottaks Volum og Tone Innstilling	8
Høytalende Volum Innstilling	9
BRUKE TELEFONEN	10
Ring ut	10
Motta Samtale	11
Repetisjon.....	11
Lydløs Funksjon.....	11
Høreapparat Bruk	12
Flash Signal	12
MINNE	12
Lagre Nummer i Minne	12
Ring Nummer fra Minne	13
FEILSØKING.....	14
SIKKERHETSINFORMASJON.....	15
GARANTI	16
AVHENDING	17

INTRODUKSJON

NB! Vennligst sjekk webside www.geemarc.com for oppdateringer. Det kan være viktige oppdateringer som man må være klar over.

Gratulerer med din nye Geemarc PHOTOTPHONE 100. Dette er en forsterket telefon med store knapper. De store knappene er både lett å se og betjene. Det er også direkte ringe taster med bilde hvor man kan ha bilder av de man ønsker å ringe. Dette hindrer feilringing gjør ringing lettere. Telefonen har også teleslynge i telefonrøret.

Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen for utnytte potensialet til Geemarc telefonen fullt ut. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan man bruker telefonen.

PHOTOPHONE 100



Pakke ut Telefonen

Når du pakker ut telefonen skal du finne følgende i esken:

- 1 PHOTOPHONE 100 telefon enhet
- 1 PHOTOPHONE 100 telefonrør med spiral ledning
- 1 Telefon linje ledning
- 1 Bruksanvisning




www.geemarc.com

Importør:



Medus AS

www.medus.no

Generell Beskrivelse

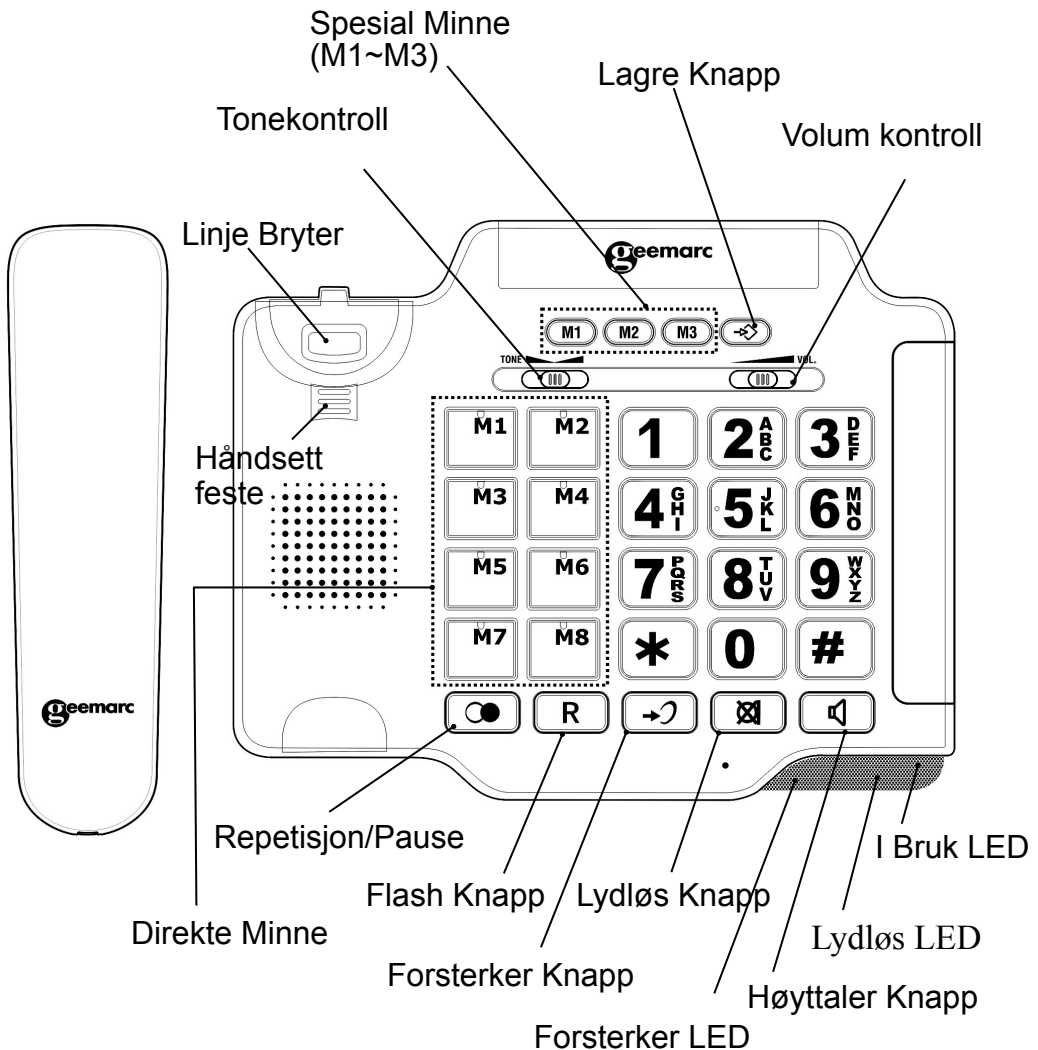

BESKRIVELSE

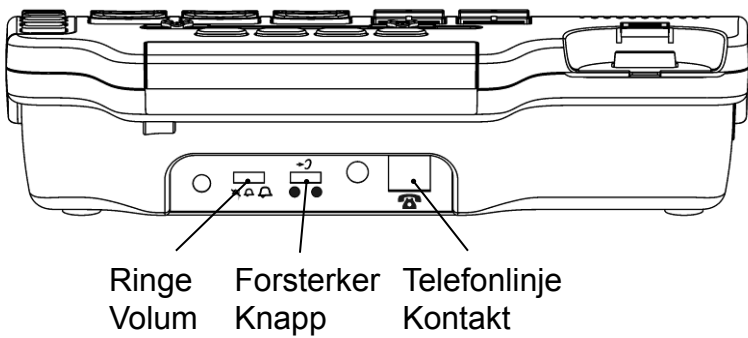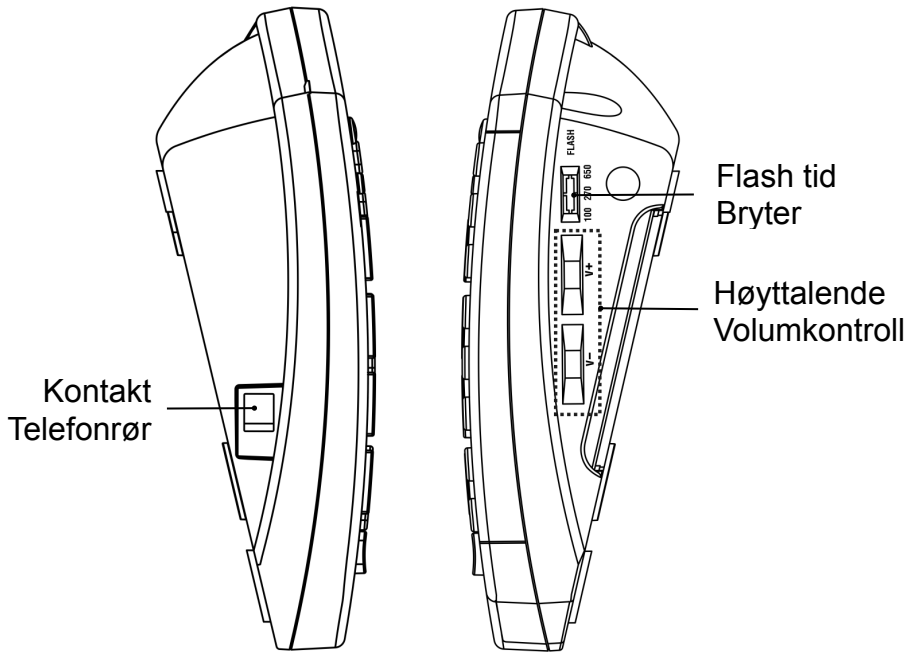

Sette Opp

Koble telefonrøret til ene enden av spiralledningen. Kobler andre enden til til venstre side på telefonen. Koble linje ledningen bak på telefonen og andre enden til telefonkontakten i veggen. Legg på røret på telefonen*.

(*) Klassifisert TNV-3 i henhold til EN60950 standard.

Vegg Montering

Skli håndsett feste ut, snu det 180 grader og skli det inn igjen slik at feste peker oppover (se diagram 1). Dette gjør at telefonrøret ikke faller av telefonen ved veggmontering.

Skrue inn to skruer over hverandre med 80mm avstand (følger ikke med). Plasser telefonen over skruhodene og skli telefonen på plass (se diagram 2). Sett telefonrøret på plass i feste.

Diagram 1


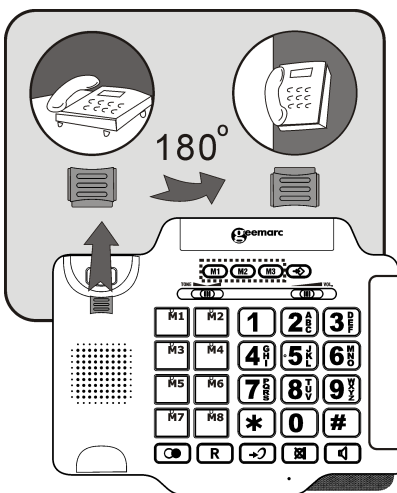


Diagram 2



Ringe Innstilling

Med bryter på baksiden av telefonen kan man stille ringe styrken til Av, Lav og Høy.

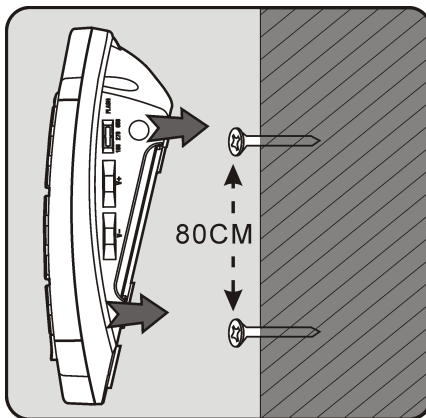

Flash Innstilling

Du kan justere flash tiden med bryteren på høyre side av telefonen. Det er tre nivåer tilgjengelig. 100ms, 270ms og 650ms.

Dette er en spesial funksjon.



FLASH

Mottaks Volum og Tone Innstilling

Du kan endre håndsett volum og tone under samtale etter dine hørsels behov. Bruk volum glide kontrollen på toppen av telefonen for å endre styrke. Volum regulering tilgjengelig er 0-15 dB.



FORSTERKER knappen  på telefonen gir ytterligere 15 dB forsterkning. Justeringen vil da være fra 15-30 dB på glide kontrollen. LED vil lyse når forsterker funksjonen er aktivert.



Forhåndsinnstilling av Forsterkning.

Forsterkning **PÅ/AV** på baksiden av telefonen tillater at man kan sette forsterkning **PÅ** eller **AV** automatisk hver gang du bruker telefonen.



INNSTILLINGER

FORSTERKNING PÅ/AV Satt i PÅ posisjon.

Ekstra forsterkning og tonekontroll er automatisk aktivert hver gang du bruker telefonen og forsterker LED lyser.

Ved å trykke Forsterker knappen under samtale vil man slå av forsterkningen og tonekontrollen. Derimot kan du fortsatt justere styrken med volum glide kontrollen. →↻

FORSTERKNING PÅ/AV Satt i AV posisjon

Ekstra forsterkning og tonekontroll er automatisk deaktivert hver gang du bruker telefonen. Forsterker LED vil være av når du bruker telefonen. Ved å trykke Forsterker knappen under samtale vil forsterkning og tonekontroll bli aktivert. LED vil lyse for vise endringen. Hvis du trykker inn Forsterker knappen en gng til vil forsterkningen og tonekontrollen slå seg av igjen. LED vil slukke for vise endringen.

Uansett hvor mange ganger du trykker på forsterker knappen under en samtale, vil funksjonen være avslått neste gang du bruker telefonen. →↻

Tone Justering

Hvis forsterkning har blitt aktivert, kan man justere på tonekontrollen. Du kan øke lave frekvenser eller høye frekvenser med tone glide bryteren på fronten av telefonen. TONE 

Bass Treble
+10db max +10db max



Merk: Tonekontrollen vil ikke virke hvis forsterkning er AV.

Høyttalende volum innstilling

I høyttalende modus kan du justere høyttaler styrken med volum kontrollen **V+** eller **V-** på høyre side av telefonen.

BRUKE TELEFONEN

Ringe Ut

Ta opp telefonrøret

Når du hører summetonen, tast inn ønsket nummer på tastatur.

For å avslutte samtalen, legg på røret.

Ringe Ut – Høytalende

Trykk  knappen for summetone.

Tast inn ønsket nummer på tastatur.

For å avslutte samtalen, trykk  igjen.

For å aktivere høytalende funksjonen under samtale trykk HØYTTALER knappen og legg på røret samtidig. For å deaktivere Høytalende funksjonen under samtale, løft av røret. 

Merk: Når du er i Høytalende modus, kan bare en av gangen snakke. Bytte mellom mikrofon og høytaler er automatisk. Dette er avhengig av lydstyrken på innkommende samtale og henholdsvis mikrofonen. Det er derfor viktig at det ikke er masse bakgrunnsstøy i nærheten av telefonen. Dette vil forstyrre høytalende funksjonen.

BRUKE TELEFONEN

Motta Samtale

Ved innkommende anrop ringer telefonen og innkommende samtale LED lyser.

Løfta av telefonrøret og snakk

For å avslutte samtalen, legg på røret.

Motta Samtale – Høytalende

Trykk  og snakk fritt.

For å avslutte samtalen 

Repetere Siste Nummer

Løft av røret to trykk  for høytalende bruk

Trykk  for å repetere siste nummer.

Lydløs Funksjon

Hvis du ønsker kan du snakke privat til andre i rommet uten at innringer hører dette. Du kan fortsatt høre innringer men de kan ikke høre deg. For slå på Stille modus under samtale, trykk STILLE knappen en gang (LED vil lyse). Innringer vil ikke høre deg mer. Trykk igjen for å fortsette samtalen med innringer (LED vil slukke). 

Høreapparat Bruk

Denne telefonen er høreapparat kompatibel. Den har teleslynge i telefonrøret. Sett Høreapparatet i T-stilling og hold røret mot apparatet.

Flash Signal

FLASH knappen **R** kan brukes med spesial tjenester som samtale venter (hvis det tilbys av din leverandør) eller overføre eksterne anrop til annen telefon ved tilkobling til sentral.

Lagre Nummer i Minne

Det er 11 minne knapper (**M1**, **M2** og **M3** og 8 Foto ringe knapper). Du kan sette inn bilder av kontaktene dine under dekselet på foto knappene. Dette er veldig nyttig hvis du har lett for å glemme navn eller telefonnummer..

Løfta av røret

Trykk  . Tast inn ønsket nummer (opp til 32 sifre). hvis påkrevd, du kan bruke  tasten for å sette inn en pause.

Trykk på ønsket minne knapp (**M1**, **M2** og **M3** eller 1 av 8 foto ringe knapper)

Trykk  igjen. Telefonnummeret vil bli lagret i valgt lokasjon.

Hvis man lagrer et nytt nummer hvor det allerede er lagret et nummer, vil dette bli slettet.

Det er et et minne kort på telefonen hvor du kan skrive opp hva som er lagret og hvor det er lagret.

Ringe Nummer fra Minnet.

Løft av røret

Trykk ønsket minne knapp (**M1**, **M2** eller **M3** eller 1 av 8 foto knapper)

Nummeret vil bli ringt umiddelbart

PHOTOPHONE100 ringer ikke

- Se til at telefonledningen er tilkoblet riktig og at den ikke er skadet.
- Koble til en annen telefon til telefonlinjen eller flytt telefonen til en annen kontakt for å sjekke om feilen er i telefonen eller i telefonlinjen.
- Det kan være for mange kommunikasjons enheter tilkoblet en enkel telefonlinje for eks. annen telefon, modem eller telefaks. Kontakt din leverandør for hjelp med å finne begrensningene for din tele-linje.
- Se til at ringetone ikke er avslått.

Ingen summetone

- Se til at telefonledningen er tilkoblet riktig og at den ikke er skadet.
- Koble til en annen telefon til telefonlinjen eller flytt telefonen til en annen kontakt for å sjekke om feilen er i telefonen eller i telefonlinjen.
- Det kan være for mange kommunikasjons enheter tilkoblet en enkel telefonlinje for eks. annen telefon, modem eller telefaks. Kontakt din leverandør for hjelp med å finne begrensningene for din tele-linje.

Generellt

Ikke åpne telefonen. Kontakt leverandør for alle reparasjoner.

Rengjøring

Rengjør telefonen med en myk klut. Bruk aldri polish eller rensesvæske. Det kan skade elektronikken på innsiden.

Plassering

Ikke utsett telefonen for direkte sollys.

Se til at det alltid er fri flyt av luft på overflaten av telefonen.

Ikke plasser noen deler av utstyret i vann og ikke bruk det i rom med høy luftfuktighet og damp som for eks. på badet.

Ikke utsett utstyret for flammer eller andre farlige forhold.

Koble telefonen fra tele-linjen ved lyn og tordenvær fordi det kan skade telefonen. Garantien dekker ikke skade ved tordenvær.

Telefonen er laget for å virke innen temperatur området 5°C til 45°C.

GARANTI

Garanti etter Norsk lov. Skulle du få et problem med produktet, så kontakt leverandør. Se vår web side www.medus.no Garantien dekker ikke ulykker, forsømmelse eller ødeleggelse av noen deler. Produktet må ikke være tuklet med eller åpnet av noen som ikke er autorisert av Geemarc eller leverandør.

VIKTIG: KVITTERINGEN ER EN VIKTIG DEL AV GARANTIEN OG MÅ TAES VARE PÅ FOR ET EVT. KRAV OM GARANTI.

Garanti etter Norsk lov.

DECLARATION: Geemarc Telecom SA erklærer herved at dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser av Radio og Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/UE og spesielt artikkel 3 seksjon 1a, 1b og seksjon 2.

Telefonen virker ikke hvis linje strømmen er under 18 mA.

Samsvarserklæring kan lastes ned på www.geemarc.com



Telefon tilkobling: Spenningen (Volt) presentert på telekommunikasjonsnettverket er klassifisert TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) i henhold til EN60950 standard.

AVHENDING

Utstyret skal avhendes som elektronikk avfall etter gjeldende lokale regler. Skal ikke kastes i husholdning søppelet.

Vennligst bruk en av disse avhendings valg:

- Fjern alle batterier og kast dem på egnet sted etter gjeldende regler. Kast så utstyret i elektronikk avfall etter gjeldende lokale regler.
- Eller lever inn utstyret til din leverandør.

Hvis du dermed respekterer dette sørger du for menneskers helse og miljøvern.



www.geemarc.com

Importør:

Medus AS

www.medus.no



UGPHOTOPH100_No_v1.6